

**NORDIC Tables are in conformity with the requirements set by the Council Directive 2017/745 on medical products class I**

#### **DE - Annahmekontrolle**

Sollte die Verpackung beschädigt sein muss dieses auf der Empfangsbestätigung vermerkt werden. Überprüfen dass alle Teile vor handen sind. Fehlt etwas, ist dieses sofort dem Lieferanten mitzuteilen. Bei Montage der Montageanweisung befolgen

#### **EN - Receiver control**

In case the package has been damaged must this be documented on the receiver document. Check that all parts are present. Missing parts has to be reported to the supplier immediately. When sample follow the mounting instruction.

#### **SE - Mottagningskontroll**

Om förpackningen uppvisar skador ska detta registreras på mottagningsbeviset. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. Fattas något anmäler detta direkt till leverantören. Följ montageanvisningen vid montering

### Montage / Mounting / Montering



1. Die Räder (4St.) platzieren und mit Clips verschließen.  
Place the wheels (4 pcs.) lock with clips.  
Placera hjulen (4 st.) och lås med clips.



2. Rückenlehne platzieren und mit Clips verschließen.  
Place backrest lock with clips.  
Placera ryggstöd och lås med clips.



4. Armlehnen platzieren (rechts/links) mit Clips verschließen.  
Place footrests (left and right) lock with clips.  
Placera fotstöd (hö o. vän) och lås med clips



3. Armlehnen platzieren (rechts u. links) mit Schraube verschließen.  
Place armrests (left and right) lock with screw.  
Placera armstöd (höger o. vänster) och lås med skruv.

#### **Teil**

1x Sitz  
1x Chassis  
4x Rollen mit Bremse  
1x Rückenlehne  
2x Armlehne (rechts und links)  
2x Fusstützen (rechts u. links)

#### **Parts**

1x Seat  
1x Frame  
4x Wheel with brake  
1x Backrest  
2x Armrests (left and right)  
2x Footrests (left and right)

#### **Delar**

1x Sits  
1x Ram  
4x Hjul med broms  
1x Ryggstöd  
2x Armstöd (höger och vänster)  
2x Fotstöd (höger och vänster)

#### **Sicherheit / Safety / Säkerhet**

**DE** - Vor Anwendung müssen Schraub-/Clipsverbindungen kontrolliert werden. Max. Belastung 200 kg darf nicht überschritten werden. Schadhafte Teile müssen sofort gewechselt werden (nur NORDIC original Teile). ACHTUNG, bewegliche Teile, Klemmgefahr!

**EN** - Before using control all screw-clips connections. The max. weight 200 kg may not be exceeded. Broken parts should be changed immediately (use only NORDIC original spare parts). Attention! Movable parts, risk of squeezing.


**SE** - Innan användning bör alla skruv-/clipsförbindelser kontrolleras. Max. belastning 200 kg bör inte överskridas. Skadade delar bör bytas omedelbart men endast mot NORDIC original reservdelar. OBS! Rörliga delar, klämrisk!

#### **Technische Information / Technical information / Teknisk information**

**DE** – Sitzhöhe einstellbar in 5 Stufen: 50 cm 52,5, 55 cm, 57,5 cm, 60 cm - max. Belastung 200 kg

**EN** – Seat height adjustable in 5 steps: 50 cm 52,5, 55 cm, 57,5 cm, 60 cm - max. load weight: 200 kg

**SE** – Sitthöjd ställbart 5 steg: 50 cm 52,5, 55 cm, 57,5 cm, 60 cm - max. brukarvikt: 200 kg

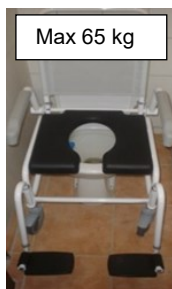

1-1270 Dusch-/Toilettenstuhl, ein neues robustes Produkt von NORDIC. Wir sind stets bemüht auf das Wohl des Patienten zu achten wenn wir neue Produkte entwickeln. Haben Sie Kommentare oder gar Vorschläge, wie wir noch besser werden können, dann lassen Sie uns dieses bitte wissen, bitte schicken Sie eine E-Mail an [nordic@nordicactivity.se](mailto:nordic@nordicactivity.se)

1-1270 Shower-/toilet chair, a new robust product from NORDIC. We always ensure the patient's best when we develop our products. If you have comments or tips how we can get even better so feel free to share this, please e-mail to [nordic@nordicactivity.se](mailto:nordic@nordicactivity.se)

1-1270 Dusch-/toalettstol, en ny robust produkt från NORDIC. Vi ser alltid till brukarens bästa när vi utvecklar våra produkter. Har du synpunkter eller tips hur vi kan bli ännu bättre så får du gärna delge detta, skicka e-mail till [nordic@nordicactivity.se](mailto:nordic@nordicactivity.se)

**Nordic activity AB**  
**Lokegatan 5**  
**SE-263 37 Höganäs**

**e-mail**  
**info@nordicactivity.se**  
**nordic@nordicactivity.se**

**Home Page:**  
**www.nordiccare.de**  
**www.nordicactivity.com**  
**www.nordicactivity.se**